

Retorsion Einstrickmethode



Exklusiv bei:



QUIDEE GmbH
Hauptstr. 53 A
35315 Homberg
Tel./Fax: +49(0)6633/9110857
E-Mail: info@quidee.de
Homepage: www.Quidee.de

GYN-stick®


Geburtshilfe für Rind und Pferd nach Dr. Schlederer

...macht das Leben leichter!

Retorsion Zweistrick-/Zweimann-Methode



Stricke anlegen, extravaginal einfädeln; GYNstick einziehen, am distalen Ende verknoten

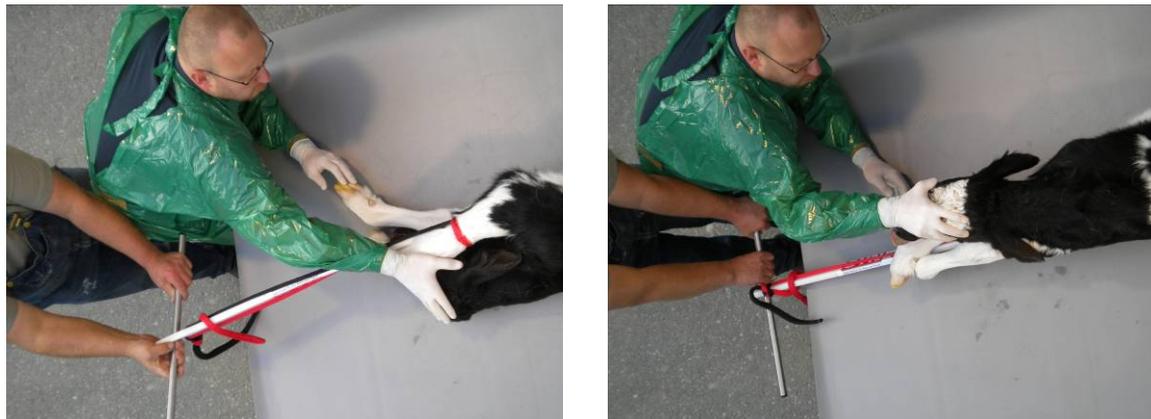

Aluminiumstab durchstecken, Tierarzt macht Kontrolle, Landwirt „dreht“: beide haben genügend Platz im Gegensatz zur üblichen Torsionsgabel, Stricke statt Manschetten können auch nicht abrutschen.

Gliedmaßenfehlstellungen korrigieren (Kühnsche Krücke)

GYN-stick[®]

Geburtshilfe für Rind und Pferd nach Dr. Schlederer



Mit Schlingenführer Faden um die Gliedmasse legen; extravaginal „einfädeln“ und Schlinge zuziehen bzw. distal ausrichten; Gliedmassenfehlstellung korrigieren.

