



Die sanfte Art des Enthornens

Was Sie über unseren Horn'up® wissen sollten





PLAN

1. Enthornung allgemein
2. Warum einen Horn'up® verwenden?
3. Wie wird richtig enthornt?
4. Wichtige Argumente für den Händler
5. Wichtige Argumente in der Zusammenfassung



Enthornung 1/2 ...

Wieso?

- Verringert das Risiko von schmerzhaften Verletzungen
- Weniger Platzbedarf an der Futterstelle oder beim Transport
- Höherer Gewinn für den Landwirt bei Viehauktionen
- Ruhigere und einfacher handelbare Tiere
- Verringert die Aggressivität der Tiere an der Futterstelle
- Höhere Sicherheit für den Landwirt, seine Familie, Mitarbeiter und alle anderen Tieren



Enthornung 2/2...

Wie und wann?

- Das Horn wächst durch hornbildende Zellen im Bereich des Schädels
- Ca. zwei Monate nach der Geburt verwächst das Horn fest mit dem Schädel
- Bevor der Schädel und das Horn verwachsen, ist die Enthornung einfacher für den Anwender und das Risiko einer Erkrankung ist sehr gering. Eine einfache Verätzung der zuständigen Blutgefäße bei Kälbern in den ersten 14 Tagen und bei Ziegen spätestens 7 Tage nach der Geburt, schliesst eine äussere Abnahme der Hörner aus und bedeutet trotzdem eine dauerhafte Enthornung



Warum einen HORN'UP verwenden 1/2

1. Nur ein Enthorner für Kälber und Ziegen nötig
2. Eine Akkuladung reicht aus für 40 Kälber oder Ziegen (= 80 Enthornungen)
3. Erreicht in weniger als einer Sekunde die Betriebstemperatur von 700° C)
4. Einfaches und schnelles Enthornen innerhalb von 7 Sekunden
5. Wird in einem Set geliefert kpl. mit Batterie-ladegerät, Bedienungsanweisung und einem Imbussschlüssel.
6. Marketingwerkzeuge sind verfügbar



Über den HORN'UP 2/2

1. 2 Jahre Garantie vom Hersteller
2. Eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Geräte
3. Ersatzteile bei qualifizierten Fachhändlern
4. Ein bedeutender technischer Fortschritt im Vergleich zu anderen Enthornern bzw. Enthornungslösungen (Akku, Mikroprozessorsteuerung, Keramikkopf, Widerstandsheizung, gutes Handling etc ...)





Wie funktioniert die Enthornung

- Kälber in den ersten 14 Tagen / Ziegen spätestens 7 Tage nach der Geburt enthornen
- Das Tier sollte in einem Fangstand fixiert werden
- Beachtet das Gesetz der Schmerzkontrolle (Anästhesie) / Tierschutzgesetz
- Die Stelle um die Hornknospe scheren
- Die Brennspitze des Horn'up auf dem Bereich der hornbildenden Zellen positionieren
- Drücken Sie den Knopf "on" und halten Sie den Knopf während des Vorgangs gedrückt
- Ein akustisches Signal zeigt an, dass der Vorgang begonnen hat
- Machen Sie nun eine 45° Drehung um eine kreisförmige Kautarisation mit einem vollständigen Brandring zu erhalten. Es ist kein starker Druck notwendig
- Nach 7 Sekunden ertönt ein akustisches Signal, welches anzeigt, dass der Vorgang beendet ist. Lassen Sie die "on" Taste los
- Kontrollieren Sie das Ergebnis und geben ein Desinfektionsspray auf die Wunde



Allgemeines

1. Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch 16 Stunden auf
2. Enthornen Sie das Tier früh genug und scheren Sie vorher den Hornansatz
3. Der Hornup® kauterisiert Gefäße und brennt die Hörner nicht heraus
4. Der Vorgang ist keine körperliche Beseitigung der Knospe
5. Drücken Sie das Gerät nicht auf den Kopf der Tieres
6. Der Endkunde muss das Garantiefomular der Acime Technologie zurücksenden, um die 2 jährige Garantie in Anspruch nehmen zu können
7. Ersatzteile verfügbar



Kurze Zusammenfassung der Hauptargumente

1. Zeitsparend und effizient. Brauch nur 1 Sekunde zum aufheizen, 7 Sekunden bei 700° C für den Enthornvorgang
2. Tierschutz (UE). Keine Verbrennungen der Nebenhöhlen, was das Risiko einer Infektion erheblich verringert. Zusätzlich hat das Tier weniger Stress
3. Lebensdauer: Verwendbar für min 30.000 Enthornungen. Wir bieten einen guten After Sale Service. Weiterhin sind sämtliche Ersatzteile für das Gerät verfügbar



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.